

医械 | 妇科治疗仪

行业与选型 5211



关键词：臭氧妇科资料仪

摘要：臭氧妇科治疗，针对妇科病的病理特点，采用低温等离子体技术将空气中的气体分子电离而产生高浓度的臭氧。臭氧具有高效、快速、广谱的特性，作用时全方位充分接触病灶、不留死角、治疗彻底，对女性阴道内各种有害致病菌有极强的杀灭作用，因而可治疗各种致病微生物引起的妇科外生殖系统疾病，活性成分可促进上皮细胞生长和创伤面的愈合，进而达到彻底治疗宫颈炎的效果。百悦康臭氧已过硬的品质十多年来在医疗级别仪器应用广泛，尤其在妇科治疗仪的民用和医用产品上拥有许多行业领先的客户。

臭氧的应用及说明：

由于医疗应用级别的目的，对臭氧发生器的性能、稳定性、可靠性都要求较高，百悦康一直坚持的高端臭氧发生器定位，在国内符合医疗器械的应用。

拥有核心的发明专利放电技术，十多年大批量的市场应用，新工厂全面提升的软硬件，在产品品质和可靠性的不断优化，让用户不断了解并认可百悦康的臭氧发生器。

臭氧发生器的选型：

- 采用发明专利 ZL200410079317.5 的核心臭氧放电体，性能全面优于普通的间隙放电发生管
- 一体化整合了臭氧驱动电路、臭氧发生管、气泵，结构紧凑、设计合理、统配性强

安装使用注意事项：

- 臭氧的输出浓度：输出浓度为 max60ug/ml； 臭氧浓度连续可调
- 气源必须为高压容器瓶装医用氧气，医用氧气标准应该符合国家相关医用氧气标准
- 安装连接：电源线接到控制板，出气嘴接上胶管通到雾化器中
- 安装位置：合适位置是出气嘴要朝下，方便冷凝积水排干
- 止回保护：建议在臭氧出口接单向阀，停止工作后保持雾气不返流
- 时间控制：根据电控板设置，建议工作为间隙时间

产品型号及参数表：

名称	臭氧发生模块	一体化臭氧发生器
型号	FQM-800	FQ-301
臭氧产生方式	管状电晕放电	管状电晕放电
输入电压	AC220V/AC110V	AC220V/AC110V
功率	7 W	7 W
臭氧量	400-800mg/hr@氧气源	200-300 mg/hr@空气源
出气量	无气泵，需外接气源	2-3 L/min
尺寸	63*52*35 mm; 40*38*88 mm	143*80*40 mm
适用范围	医用级接氧气源	自带气泵，民用级方便使用